

1. Na spolupracující pracoviště budou společností Elphogene, s.r.o. dodány Sady na odběr krve za účelem získání volné cirkulující DNA a vyšetření oncoMonitor. Každá sada obsahuje odběrové zkumavky, podrobný návod pro odběr vzorku, žádanku na molekulárně genetické vyšetření (obsahuje veškeré náležitosti požadované normou 15189) a kontakt na zodpovědné pracovníky.
2. Vyšetření oncoMonitor mohou podstoupit pacienti s níže specifikovanou diagnózou a kritérii pro odběr krevního vzorku:
 - nádor tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) – C18-20;
 - diagnóza nádoru ve stádiu TNM IV s přítomnými metastázami v játrech/plicích, případně původně lokalizovaný nádor, který se vyvinul do diseminované podoby;
 - pacient, kterému nebyla v předešlých min. 10 dnech podávána chemoterapeutická/radioterapeutická/cílená biologická léčba.
3. Odběry krve budou probíhat v pravidelných intervalech podle schématu na Straně 2.
4. Vlastní postup odběru vzorku:
 - Odběrová sada obsahuje 2 odběrové zkumavky.
 - Periferní krev se odebírá pomocí klasického Vacutainer systému.
 - Vhodné je odebrat dvě plné zkumavky, tj. 2x 9ml krve. V případě problémů s odběrem krve odebrat alespoň jednu plnou zkumavku. Nikdy neodebírat 2 poloprázdné zkumavky.
 - Po odběru krve do zkumavky je třeba krev opatrně promíchat – pomalým překlápěním zkumavky 5x.
 - Zkumavky vložit do bílého obalu, ve kterém byly původně uloženy.
 - Balíček se zkumavkami zabalit do gelového „icepacku“ udržujícího teplotu.
 - Tento balíček vložit do polystyrenové krabičky a celé vložit do papírové krabičky a tímto zkompletovat sadu pro odeslání do laboratoře společnosti Elphogene, s.r.o.
 - V odběrové sadě je přiložená žádanka pro molekulárně-genetické vyšetření, kterou je třeba důkladně vyplnit a vložit společně s aktuální lékařskou zprávou pacienta do krabičky.
 - Takto zkompletovanou sadu je možné nechat v klidu **ležet při pokojové teplotě maximálně 4 dny**. Nicméně prosíme o okamžité podání informace o provedeném odběru vzorku do laboratoře.
5. Kontaktní osoby společnosti Elphogene, s.r.o.:
6. Transport odebraných vzorků zajišťuje laboratoř společnosti Elphogene, s.r.o.

Schéma odběrů krve pro test oncoMonitor:

